

INSTRUKCJA UŻYWANIA WYROBU MEDYCZNEGO MAGNETOPLAG® Polfa-Łódź

MAGNETOPLAG® Polfa-Łódź jest pomocniczym środkiem terapeutycznym do przewlekłej, łagodnej stymulacji kanału odbytu w przebiegu choroby hemoroidalnej, po uprzednim wykluczeniu choroby nowotworowej jelita grubego.

OPIS:

MAGNETOPLAG® Polfa-Łódź składa się z 2 niezależnych wielobiegunowych magnesów, zamkniętych w obudowach w kształcie litery T, wykonanych z twardego tworzywa sztucznego, koloru białego, zakończonych ogranicznikiem, na którym umieszczono oznaczenie koloru zielonego lub pomarańczowego.

Korpus wkładek został wyprofilowany w taki sposób, aby uzyskać maksymalną tolerancję organizmu na terapię doodbytniczą i zapewnić pacjentowi uczucie komfortu podczas całego procesu leczenia.

Magnesy wchodzące w skład kompletu MAGNETOPLAG® Polfa-Łódź są namagnesowane wielobiegunowo, ze zdefiniowanym rozmieszczeniem biegunów magnetycznych. Jeden magnes jest namagnesowany biegunami w kształcie pierścieni, drugi biegunami w kształcie linii podłużnych, dzięki czemu podczas terapii linie pola magnetycznego zamykają się, zapewniając równomierne oddziaływanie pola magnetycznego na okolicę odbytu.

Natężenie pola magnetycznego na powierzchni MAGNETOPLAG® Polfa-Łódź wynosi 30-40 mT(300 – 400 Gausów), co całkowicie mieści się w granicach zalecanych wartości natężenia stałego pola magnetycznego, zalecanych do stymulacji organizmu ludzkiego.

DZIAŁANIE

MAGNETOPLAG® Polfa-Łódź reguluje krążenie krwi w naczyniach w układzie żylnym dolnego odcinka jelita, zmniejsza dolegliwości bólowe oraz świąd w obrębie odbytu.

WSKAZANIA

Choroba hemoroidalna.

PRZECIWWSKAZANIA

Choroba nowotworowa (w tym również przebyta), ostre choroby infekcyjne, czynna postać gruźlicy, krwawienia z przewodu pokarmowego.

Nie zaleca się stosowania terapii z użyciem MAGNETOPLAG® Polfa-Łódź u osób: z ostrymi chorobami serca i ciężką niewydolnością krążenia, zaawansowanymi zaburzeniami ukrwienia kończyn dolnych, wszczepionym rozrusznikiem serca, posiadających metalowe implanty w obrębie miednicy mniejszej (sztuczne stawy, antykoncepcyjna wkładka domaciczna), po przebytych zabiegach chirurgicznych (okres krótszy niż trzy miesiące od zabiegu), oraz u kobiet w ciąży i w trakcie laktacji.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Magnetoterapia może prowadzić do wzmożenia popędu płciowego, okresowego obniżenia ciśnienia tętniczego, a także przemijającej biegunki.

OSTRZEŻENIA

MAGNETOPLAG[®] Polfa-Łódź może być stosowany w leczeniu choroby hemoroidalnej po uprzednim wykluczeniu nowotworu jelita grubego.

MAGNETOPLAG[®] Polfa-Łódź jest urządzeniem przeznaczonym wyłącznie do osobistego użytku. Bezwzględnie przeciwwskazane jest przekazywanie go do użytku innym osobom, w związku z dużym ryzykiem przeniesienia na jego powierzchni materiału zakaźnego i potencjalnego rozwoju chorób zakaźnych.

ZALECENIA SPECJALNE

Przed rozpoczęciem stosowania wyrobu medycznego MAGNETOPLAG[®] Polfa-Łódź należy skonsultować się z lekarzem.

Osoby, u których planowane są jakiegokolwiek badania diagnostyczne powinny poinformować lekarza o aktualnie prowadzonym leczeniu stałym polem magnetycznym.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed każdym użyciem MAGNETOPLAG[®] Polfa-Łódź powinien być dokładnie umyty wodą z mydłem i osuszony.

Część aktywną wkładki do linii ogranicznika należy powlec wazeliną. Tak przygotowany MAGNETOPLAG[®] Polfa-Łódź powinien być ostrożnie wprowadzony do odbytu. W przypadku trudności z wprowadzeniem do odbytu należy MAGNETOPLAG[®] Polfa-Łódź wprowadzać stopniowo, z przerwami, tak aby uniknąć uszkodzenia błony śluzowej.

Po wprowadzeniu wkładki do kanału odbytu pacjent powinien pozostać w pozycji bocznej leżącej przez okres jednej do dwóch godzin.

Po użyciu należy wkładkę dokładnie umyć wodą z mydłem i osuszyć.

Do pierwszego użycia wybiera się dowolną z dwóch sztuk.

Następnego dnia należy użyć sztuki nie używanej w dniu poprzednim.

Leczenie powinno być kontynuowane przez minimum 10 dni, nie dłużej jednak niż 21 dni.

Jeśli jest to konieczne, można je powtórzyć po uprzedniej 10-dniowej przerwie

Postępowanie jak poprzednio.

Wkładek nie wolno aplikować do pochwy.

PRZECHOWYWANIE

MAGNETOPLAG[®] Polfa-Łódź ma 10 letni okres trwałości. Nie zaleca się używania urządzenia posiadającego uszkodzenia mechaniczne (rysy, pęknięcia).

Urządzenie należy przechowywać w odległości minimum 10 cm od urządzeń wrażliwych na działanie pola magnetycznego (zegarki, kalkulatory, taśmy magnetyczne, rozruszniki serca) w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

WYTWÓRCA

Zakłady Farmaceutyczne Polfa-Łódź SA, ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź

Posiada certyfikat CE 1434

Wszelkie prawa zastrzeżone Patentem nr 1608/83

Data wydania: 26.10.2011 r.